

BIOCLIN FAST COVID-19 anti-RBD

Teste imunocromatográfico rápido para a determinação qualitativa de anticorpos anti-RBD para o SARS-CoV-2 (coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2) em amostras biológicas obtidas por punção digital ou venopunção sangue total, soro ou plasma (EDTA, ou Heparina). Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

REAGENTES

Número 1 (R1): Cassete - Conservar entre 2 e 30 °C. **Não congelar.**
Contém:

A) 01 cassette plástico com 01 tira teste contendo:
- Região de Controle (C): IgG de Coelho;
- Região de Teste (T): Anticorpo anti-IgG Humano;
- Conjugado: Antígeno RBD de SARS-CoV-2 e anticorpos-anti-IgG de coelho conjugados com nanopartículas de ouro coloidal.

B) 01 sachê de sílica

Número 2 (R2): Diluente - Conservar entre 2 e 30 °C. **Não congelar.**
Contém: Solução Tampão < 100 mmol/L pH 8,2, surfactante e conservante.

Acessórios para Coleta:

- Pipeta plástica descartável
- Lanceta descartável (Estéril)

AMOSTRAS

Punção digital ou venopunção sangue total, soro ou plasma (EDTA ou Heparina).

COMPONENTES DO KIT



MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO CONTIDOS NO KIT

- Relógio ou cronômetro
- Epi's
- Descarte
- Álcool 70% (p/p)
- Algodão

CUIDADOS ESPECIAIS

- Não utilizar kit fora da data de validade. O prazo de validade está indicado no rótulo do produto.
- Os cassetes (dispositivos de teste) não apresentam substâncias contaminantes, mas como as amostras são biológicas, as rotinas de segurança devem ser seguidas com rigor e o uso de jaleco, de luvas descartáveis e máscaras é imprescindível.

TÉCNICA

Retirar o cassette da embalagem protetora, colocá-lo sobre uma superfície limpa e nivelada e identificá-lo de forma adequada.

Lavar e secar as mãos do paciente.

Passar álcool 70% (p/p) na ponta do dedo para antisepsia da área utilizada.

Remover a tampa de proteção da lanceta.

Pressionar a ponta do dedo, promovendo desta forma um acúmulo de sangue nesta região, que será perfurada com a lanceta.
Posicionar e pressionar a lanceta com firmeza sobre a área a ser puncionada.

Coletar o sangue com auxílio da pipeta plástica descartável que acompanha o kit. Aperte a pipeta plástica acima do traço marcado e encoste a cavidade aberta da pipeta plástica na gota de sangue. Alivie a pressão na pipeta plástica para que o sangue seja aspirado. Aspire o sangue até o traço marcado na pipeta plástica descartável (equivalente a 20 µL de sangue).

No poço de amostra, dispensar o sangue pressionando novamente a pipeta.


Segurar o frasco verticalmente e aplicar 2 gotas (aproximadamente 80 µL) de Diluente (Reagente N° 2) no poço da amostra.

Aguardar a formação das linhas. Interpretar os resultados entre 15 e 20 minutos. Não interpretar após 20 minutos.


BIOCLIN FAST COVID-19 anti-RBD

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS


Teste Reagente: Formação uma linha vermelha na região teste (T) e outra linha na região de controle (C) nos primeiros 15 a 20 minutos. Não interpretar após 20 minutos.

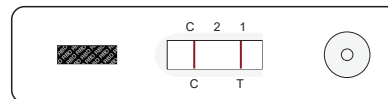


Teste Não Reagente: Formação de uma linha vermelha na região controle (C) e ausência completa de linha vermelha na região teste (T). Não interpretar após 20 minutos.

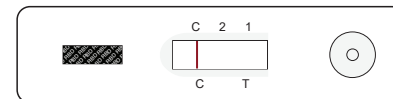

Resultado Inválido: Ausência completa de linha na região controle (C) com ou sem linha vermelha na região teste (T). Testar a amostra novamente.

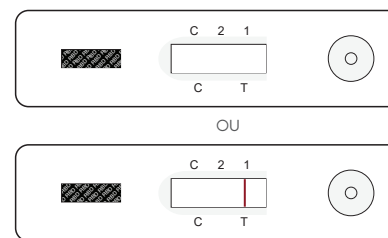

OU

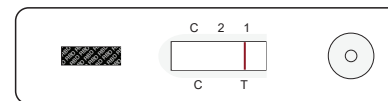

OBSERVAÇÕES

- Os materiais do kit que tiveram contato com o material biológico do paciente devem ter um destino especial.
- Os cassetes (dispositivos de teste), pipetas e frascos de diluente devem ser descartados em lixo biológico e as lancetas em lixo perfurocortantes.
- Caixas, instrução de uso, envelope de alumínio e sachê de sílica podem ser descartados em lixo comum.
- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.

Revisão: Junho/2021

Número de registro do kit Bioclin Fast COVID-19 anti-RBD na ANVISA: 10269360342

Bioclin

sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

SAC Serviço de
Assessoria ao Cliente
0800 031 5454