

Teste para determinação qualitativa de antígeno p27 do vírus da leucemia felina em soro ou plasma, por ensaio imunoenzimático, em microplaca. Somente para diagnóstico *in vitro*.

PREPARO DE REAGENTES, AMOSTRAS E CONTROLES

Solução de Lavagem: Diluir o conteúdo da Lavagem Concentrada (Reagente N° 3) em 1000 mL de água destilada ou deionizada.

ATENÇÃO: O conjugado (R2), o Controle Negativo (R6) e Controle Positivo (R7) estão prontos para uso.

CUT OFF

Absorbância Média do Controle Negativo + 0,200

AMOSTRAS

Soro ou Plasma

VALIDAÇÃO (Absorbância)

Branco < 0,100

Controle Negativo: 0,100 a 0,300

Controle Positivo > 0,800

INTERPRETAÇÃO (Índice)

Negativo: < 0,9

Indeterminado: ≥ 0,9 e ≤ 1,1

Positivo: > 1,1

TÉCNICA




Pipetar 50 µL de Controle Positivo, Controle Negativo e as Amostras nas microcavidades previamente determinadas. Homogeneizar suavemente.


Obs: Separar a primeira cavidade para o Branco (opcional).



Pipetar 50 µL de conjugado em cada microcavidade, inclusive na microcavidade do Branco. Homogeneizar gentilmente por aproximadamente 10 segundos. Cobrir as microcavidades com selador de placas e incubar por 60 minutos à 37°C.

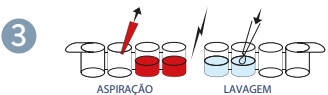

Lavar as microcavidades cinco vezes com 300 µL de Solução de Lavagem previamente preparada. Agitar por 3 segundos em cada lavagem. Para secar, bater a placa em papel absorvente.

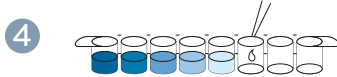

Pipetar 100 µL de Substrato em todas as microcavidades. Homogeneizar suavemente por ± 10 segundos. Cobrir com selador de placa. Incubar por 10 minutos em incubadora à 37°C, protegido da luz.



Pipetar 100 µL de Solução de Parada em todas as microcavidades. Homogeneizar suavemente por ± 10 segundos. Efetuar a leitura das absorbâncias em filtro duplo 450nm/630nm em até 15 minutos.

ERROS EM ELISA E SUAS CAUSAS

ABSORBÂNCIAS BAIXAS DE CONTROLES

- Temperatura ambiente baixa
- Temperatura do kit abaixo da temperatura ideal de trabalho 15 – 30°C
- Temperatura de incubação do teste abaixo da temperatura ideal de trabalho a 37°C
- Pipetado volume menor de Controles
- Pipetado volume maior de reagente
- Solução de Parada não pipetada
- Secagem inadequada (após lavagem)
- Tempo de incubação menor
- Homogeneização deficiente
- Equipamento com problema
- Erro na programação do teste
- Lido em comprimento de onda incorreto
- Componente do kit deteriorado

ABSORBÂNCIAS BAIXAS DE AMOSTRAS

- Temperatura ambiente baixa
- Temperatura do kit abaixo da temperatura ideal de trabalho 15 – 30°C
- Temperatura da amostra abaixo da temperatura ideal de trabalho 15 – 30°C
- Temperatura de incubação do teste abaixo da temperatura ideal de trabalho 37°C
- Pipetado volume menor de amostra
- Pipetado volume maior de reagente
- Solução de Parada não pipetada
- Secagem inadequada (após lavagem)
- Tempo de incubação menor
- Homogeneização deficiente
- Equipamento com problema
- Erro na Programação do teste
- Lido em comprimento de onda incorreto
- Amostra deteriorada ou inadequada
- Componente do kit deteriorado

ABSORBÂNCIAS ALTAS DE CONTROLES

- Temperatura ambiente alta
- Temperatura do kit acima da temperatura ideal de trabalho 15 – 30°C
- Temperatura de incubação do teste acima da temperatura ideal de trabalho a 37°C
- Pipetado volume maior de Controles
- Substrato: coloração azulada indica contaminação
- Pipetado volume menor de reagente
- Solução de Parada não pipetada
- Lavagem inadequada
- Tempo de incubação maior
- Agitação na bancada de trabalho
- Fundo da cavidade sujo
- Equipamento com problema
- Erro na programação do teste
- Lido em comprimento de onda incorreto
- Componente do kit deteriorado

ABSORBÂNCIAS ALTAS DE AMOSTRAS

- Temperatura ambiente alta
- Temperatura do kit acima da temperatura ideal de trabalho 15 – 30°C
- Temperatura da amostra acima da temperatura ideal de trabalho 15 – 30°C
- Temperatura de incubação do teste acima da temperatura ideal de trabalho a 37°C
- Pipetado volume maior de amostra
- Pipetado volume menor de reagente
- Substrato: coloração azulada indica contaminação
- Solução de Parada não pipetada
- Lavagem inadequada
- Tempo de incubação maior
- Agitação na bancada de trabalho
- Fundo da cavidade sujo
- Equipamento com problemas
- Erro na Programação do teste
- Lido em comprimento de onda incorreto
- Amostra deteriorada ou inadequada
- Componente do kit deteriorado

Revisão: Março/2026 (1)