

Cód.: 00

<b>A25</b>	
<b>GERAL</b>	
Nome	BILIR TOTAL
Tipo de Amostra	SORO
Modo de Análise	Difer - Bi Reag.
Unidades	mg/dL
Tipo de Reação	Crescente
Nº de Replicatas	1
Decimais	2
<b>PROCEDIMENTO</b>	
Leitura	Monocromática
Principal	535
Referência	-
Amostra	10
Reagente 01	200
Reagente 02	50
Lavagem	1,2
Leitura 01	135s   Ciclo 10
Leitura 02	405s   Ciclo 28
Reagente 2	180s   Ciclo 13
Fator de Pré-diluição	NÃO
Pré diluição pelo analisador	-
Pré diluição pelo usuario	-
Fator de pós diluição reduzido	1/2
Fator de pós diluição aumentado	1/2
Repetição Automática	SIM
<b>CALIBRAÇÃO</b>	
Tipo de Calibração	Calibrador Múltiplo
Replicatas do Calibrador	1
Replicatas do Branco	2
Concentração	Biocal
<b>CONTROLES</b>	
Nº de Controles	2
Replicatas do Controle	1
Critério de Rejeição	3s
Tipo de Controle	Múltiplo
Modo de Cálculo	Manual
Controle 1	Biocontrol N
Controle 2	Biocontrol P
<b>OPÇÕES</b>	
Branco só com Reagente	SIM
Branco com solução salina	NÃO
Limite de absorção do branco	
Limite do Branco Cinético	
Limite de Linearidade	30
Limite de Detecção	0,04
Efeito prozona	
Função slope	
Substrato esgotado	
Limite do Fator	
Faixa de referência	0,1 – 1,2
Faixa de repetição	

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.