

Catálogo: K051-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 333

Versão: 13/07/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

		A25
GERAL		
Nome	Cálcio Arsenazo III	
Tipo de Amostra	SORO	
Modo de Análise	Ponto Final - Mono	
Unidades	mg/dL	
Tipo de Reação	Crescente	
Nº de Replicatas	1	
Decimais	2	
PROCEDIMENTO		
Leitura	Monocromática	
Principal	635	
Referência		
Amostra	3	
Reagente 01	300	
Reagente 02		
Lavagem	1,2	
Leitura 01	120s Ciclo 9	
Leitura 02		
Reagente 2		
Fator de Pré-diluição	NÃO	
Pré diluição pelo analisador		
Pré diluição pelo usuario		
Fator de pós diluição reduzido	1/2	
Fator de pós diluição aumentado	1/2	
Repetição Automática	SIM	
CALIBRAÇÃO		
Tipo de Calibração	Calibrador Múltiplo	
Replicatas do Calibrador	2	
Replicatas do Branco	1	
Concentração	Biocal	
CONTROLES		
Nº de Controles	2	
Replicatas do Controle	1	
Critério de Rejeição	3s	
Tipo de Controle	Múltiplo	
Modo de Cálculo	Manual	
Controle 1	Biocontrol N	
Controle 2	Biocontrol P	
OPÇÕES		
Branco só com Reagente	SIM	
Branco com solução salina	NÃO	
Limite de absorção do branco		
Limite do Branco Cinético		
Limite de Linearidade	20	
Limite de Detecção		
Efeito prozona		
Função slope		
Substrato esgotado		
Limite do Fator		
Faixa de referência	8,8 – 11,0	
Faixa de repetição		

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.