

Catálogo: K010

CK NAC UV

Nº de Testes: 166

Versão: 27/03/2025

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K010-1

Reagente Nº 1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Enzima-Substrato – 1 x 10 mL

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO PARA DOSAGEM MONORREAGENTE:

Misturar 4 partes do reagente Nº1 com 1 parte do reagente Nº2. Estável durante 2 dias nas temperaturas de 15 a 30°C e 15 dias de 2 a 8°C.

		A25	
GERAL			
Nome		CK NAC	
Tipo de Amostra		SORO	
Modo de Análise		Cinético - Monorreag	
Unidades		U/L	
Tipo de Reação		Crescente	
Nº de Replicatas		1	
Decimais		1	
PROCEDIMENTO			
Leitura		Monocromática	
Principal		340	
Amostra		6	
Reagente 01		300	
Lavagem		1,2	
Leitura 01		90s	Ciclo 7
Leitura 02		240s	Ciclo 17
Reagente 2			
Fator de Pré-diluição		NÃO	
Fator de pós diluição reduzido		1/2	
Fator de pós diluição aumentado		1/2	
Repetição Automática		SIM	
CALIBRAÇÃO			
Tipo de Calibração		Calibrador Múltiplo	
Replicatas do Calibrador		2	
Replicatas do Branco		1	
Concentração		Biocal	
CONTROLES			
Nº de Controles		2	
Replicatas do Controle		1	
Critério de Rejeição		3s	
Tipo de Controle		Múltiplo	
Modo de Cálculo		Manual	
Controle 1		Biocontrol N	
Controle 2		Biocontrol P	
OPÇÕES			
Branco só com Reagente		NÃO	
Branco com solução salina		NÃO	
Limite de Linearidade		2000	
Limite de Detecção		9,4	
Substrato esgotado		3000	
Limite do Fator			
Faixa de referência		24 - 195	
Faixa de repetição			

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#). Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.