

Catálogo: K046

AMILASE CINÉTICA

Nº de testes: 300

Versão: 20/11/2018

Observações: APRESENTAÇÃO:

K046-1

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

Os reagentes são prontos para uso.

Nome do teste	<input type="text" value="AMILASE CINÉTICA"/>			Tipo	<input type="text" value="SORO"/>	Ativo	<input type="text" value="Sim"/>
Amostra	Volume	<input type="text" value="4.0"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	Fator de diluição	<input type="text" value="1"/>
Reagentes	Volume R1	<input type="text" value="200"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	DO mín	<input type="text" value="-2.0000"/>
	Volume R2	<input type="text" value="0"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	DO máx	<input type="text" value="2.5000"/>
Comp. de onda	Pri	<input type="text" value="405 nm"/>	Seg	<input type="text" value="No"/>		Limite da DO dos reagentes	
Método		<input type="text" value="RATE"/>				R1 mín.	<input type="text" value="-2.0000"/>
						R1 máx	<input type="text" value="2.5000"/>
Declive da reação		<input type="text" value="+"/>				R2 mín.	<input type="text" value="-2.0000"/>
						R2 máx	<input type="text" value="2.5000"/>
Intervalo de leitura-1	Início	<input type="text" value="7"/>	Fim	<input type="text" value="18"/>		Limites de Linearidade	
						Mín	<input type="text" value="3.5"/>
						Máx	<input type="text" value="2000"/>
Intervalo de leitura-2	Início	<input type="text"/>	Fim	<input type="text"/>		Fator de correlação	
						A	<input type="text" value="1.000000"/>
						B	<input type="text" value="0.000000"/>
Tolerância		<input type="text" value="%"/>				Estabilidade a bordo	<input type="text" value="00 Days"/>
Há período intestável?		<input type="text" value="No"/>					

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. (Calibração: AB - Fórmula: Y = AX +B)  
Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.