

Catálogo: K010

CK NAC UV

Nº de testes: 250

Versão: 20/11/2018

Observações: APRESENTAÇÃO:

K010-1

Reagente N° 1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente N° 2 – Enzima - Substrato – 1 x 10 mL

Os reagentes são prontos para uso em analisadores bioquímicos automáticos.

Nome do teste	<input type="text" value="CK NAC UV"/>			Tipo	<input type="text" value="SORO"/>	Ativo	<input type="text" value="Sim"/>		
Amostra	Volume	<input type="text" value="4.0"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	Fator de diluição	<input type="text" value="1"/>		
Reagentes	Volume R1	<input type="text" value="160"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	DO mín	<input type="text" value="-2.00000"/>	DO máx	<input type="text" value="2.5000"/>
	Volume R2	<input type="text" value="40"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	Mín.	<input type="text" value="-2.00000"/>	Máx.	<input type="text" value="2.5000"/>
Comp. de onda	Pri	<input type="text" value="340 nm"/>	Seg	<input type="text" value="No"/>		Limite da DO dos reagentes			
Método		<input type="text" value="RATE"/>				R1 mín.	<input type="text" value="-2.0000"/>	R1 máx	<input type="text" value="2.5000"/>
Declive da reação		<input type="text" value="+"/>				R2 mín.	<input type="text" value="-2.0000"/>	R2 máx	<input type="text" value="2.5000"/>
Intervalo de leitura-1	Início	<input type="text" value="17"/>	Fim	<input type="text" value="25"/>		Limites de Linearidade			
Intervalo de leitura-2	Início	<input type="text"/>	Fim	<input type="text"/>		Mín	<input type="text" value="9.4"/>	Máx	<input type="text" value="2000.0"/>
Tolerância		<input type="text" value="20%"/>				Fator de correlação			
Há período instável?		<input type="text" value="No"/>				A	<input type="text" value="1.000000"/>	B	<input type="text" value="0.000000"/>
						Estabilidade a bordo	<input type="text" value="00 Days"/>		

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. (Calibração: AB - Fórmula: Y = AX +B)  
Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.