

Catálogo: K046-1

AMILASE CINÉTICA

Nº de Testes: 60

Versão: 21/06/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO:

K046-1

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

MODO	CIN
WL 1	405
WL 2	---
BLANK ?	NÃO
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	500
RETARDO	030
FATOR	3954
UNID.	U/L
DECIMAIS	1
IMPRESSÃO	EXTENSA
INT. CINÉTICO	60
Nº INTERVALOS	3
A / MÍN.	0.5
% LIM. LIN	20.0
DIR.	INCR
ABS REAT MIN	0.10
ABS REAT MAX	0.80
VR/VN MIN	0.0
VR/VN MAX	90.0

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.