

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 25

Versão: 21/06/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO:

K108-1

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente N°3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	P. F.
WL 1	620
WL 2	---
BLANK ?	SIM
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	700
RETARDO	003
PADRÃO	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	65
UNID.	mg/dL
DECIMAIS	1
LIM LIN. MIN.	1.7
LIM LIN MÁX	100
ABS REAT MIN	#
ABS REAT MAX	#
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	1.0
VR/VN MAX	15.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente N° 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.