

Catálogo: K051-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 100

Versão: 21/06/2018

Cód.: 01

**APRESENTAÇÃO:**

**K051-2**

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	P. F.
WL 1	620
WL 2	---
BLANK ?	SIM
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	25 °C
VOL. ASP.	500
RETARDO	003
PADRÃO	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	10.0
UNID.	mg/dL
DECIMAIS	1
LIM LIN. MIN.	0.0
LIM LIN MÁX	20.0
ABS REAT MIN	0.00
ABS REAT MAX	1.00
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	8.8
VR/VN MAX	11.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.