

Catálogo: K084-2

LACTATO

Nº de Testes: 50

Versão: 05/07/2018

Cód.: 01

**APRESENTAÇÃO:**

**K084-2**

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 2 x 20 mL

Reagente N°2 – Coenzima – 2 x 5 mL

Reagente N°3 – Padrão – 1 x 3 mL

**PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO PARA DOSAGEM MONORREAGENTE:**

Misturar 4 partes do Reagente N° 1 com 1 (uma) parte do Reagente N° 2. O Reagente de Trabalho é estável durante 2 semanas entre 2 e 8°C.

MODO	P. F.
WL 1	340
WL 2	---
BLANK ?	SIM
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	700
RETARDO	003
PADRÃO	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	30.0
UNID.	mg/dL
DECIMAIS	1
LIM LIN. MIN.	1.0
LIM LIN MÁX	120
ABS REAT MIN	0.00
ABS REAT MAX	1.00
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	4.5
VR/VN MAX	19.8

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 3 (Padrão 30,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.