

Catálogo: K025

LIPASE

Nº de Testes: 20

Versão: 21/06/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO

K025

Reagente N°1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente N°2 – Inibidor Enzimático – 1 x 1 mL

Reagente N°3 – Reagente de Cor – 1 x 4 mL

Reagente N°4 – Substrato – 1 x 2 mL

Reagente N°5 – Acetona – 1 x 80 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	P. F.
WL 1	405
WL 2	---
BLANK ?	NÃO
BLK-AMOS/PAD ?	SIM / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	25 °C
VOL. ASP.	700
RETARDO	003
PADRÃO	NÃO
FATOR	143
UNID.	U/L
DECIMAIS	1
LIM LIN. MIN.	1.1
LIM LIN MÁX	300
ABS REAT MIN	0.00
ABS REAT MAX	1.80
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	2.0
VR/VN MAX	15.0

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.