

Catálogo: K116-2

**MAGNÉSIO MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 200

Versão: 21/06/2018

Cód.: 01

**APRESENTAÇÃO:**

**K116-2**

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 2 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	P. F.
WL 1	505
WL 2	---
BLANK ?	SIM
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	700
RETARDO	003
PADRÃO	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	2.0
UNID.	mg/dL
DECIMAIS	1
LIM LIN. MIN.	0.0
LIM LIN MÁX	5.0
ABS REAT MIN	#
ABS REAT MAX	#
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	1.6
VR/VN MAX	2.4

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 2,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.