

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 03/07/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO:

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	P. F.
WL 1	546
WL 2	---
BLANK ?	SIM
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	700
RETARDO	003
PADRÃO	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	4.0
UNID.	g/dL
DECIMAIS	1
LIM LIN. MIN.	0.0
LIM LIN MÁX	12.0
ABS REAT MIN	0.00
ABS REAT MAX	0.80
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	6.0
VR/VN MAX	8.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.