

Catálogo: K117-1

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Nº de Testes: 100

Versão: 21/06/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO:

K117-1

Reagente Nº1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	P. F.
WL 1	505
WL 2	---
BLANK ?	SIM
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	700
RETARDO	003
PADRÃO	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	100.0
UNID.	mg/dL
DECIMAIS	1
LIM LIN. MIN.	2.6
LIM LIN MÁX	900
ABS REAT MIN	0.00
ABS REAT MAX	0.30
ABS PAD MÍN	#
ABS PAD MÁX	#
VR/VN MIN	0.0
VR/VN MAX	150

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 100,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.