

Catálogo: K031-1

**PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 250

Versão: 17/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K031-1**

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

N. METHOD	PROT TOTAIS
METHOD TYPE	EP: END POINT
ZERO	BLANK
MEASURE UNIT	g/dL
TEMPERATURE	37°C
CALIBRATION	YES
NUMBER STANDARD	1
STANDARD	4.0
SAMPLE	50 µL
REAGENT 1	700 µL *
REAGENT 2	-
FILTER (nm)	546
NORMAL MAX	8.0
NORMAL MIN	6.0
LINEARITY	12.0
MAX ABS	2.500
MIN ABS	0.001
TIME INCUBATION	3
QC1 NAME	
QC1 VALUE	#
QC1 S.D.	
QC2 NAME	
QC2 VALUE	#
QC2 S.D.	
QC3 NAME	
QC3 VALUE	#
QC3 S.D.	

**Volume de Aspiração (\*)**

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.