

Catálogo: K040-1

ALBUMINA MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 03/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K040-1**

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 250 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	ALBUMINA
UNIDADES	g/dL
MODO DE ANÁLISE	PONTO FINAL
TIPO DE REAÇÃO	CRESCENTE
MODO DE LEITURA	MONOCROMÁTICA
FILTRO DE LEITURA	620
FILTRO REFERÊNCIA	-
VOLUME DE ASPIRAÇÃO	500
RÉPLICAS DO BRANCO	1
RÉPLICAS DA AMOSTRA	1
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	3
TEMPERATURA	37°C
DECIMAIS	1
CALIBRAÇÃO	CALIBRADOR
NÚMERO DE CALIBRADORES	1
CONCENTRAÇÃO	3.8
RÉPLICAS CALIBRAÇÃO	-
LIMITE DE LINEARIDADE	6.0
LIMITE DA ABS BRANCO	-
VALOR MÍNIMO NORMAL	3.5
VALOR MÁXIMO NORMAL	5.5

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.