

Catálogo: K051-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 100

Versão: 03/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K051-2

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	CÁLCIO ARS III
UNIDADES	mg/dL
MODO DE ANÁLISE	PONTO FINAL
TIPO DE REAÇÃO	CRESCENTE
MODO DE LEITURA	MONOCROMÁTICA
FILTRO DE LEITURA	670
FILTRO REFERÊNCIA	-
VOLUME DE ASPIRAÇÃO	500
RÉPLICAS DO BRANCO	1
RÉPLICAS DA AMOSTRA	1
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	3
TEMPERATURA	37°C
DECIMAIS	1
CALIBRAÇÃO	CALIBRADOR
NÚMERO DE CALIBRADORES	1
CONCENTRAÇÃO	10.0
RÉPLICAS CALIBRAÇÃO	-
LIMITE DE LINEARIDADE	20.0
LIMITE DA ABS BRANCO	-
VALOR MÍNIMO NORMAL	8.8
VALOR MÁXIMO NORMAL	11.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.