

Catálogo: K031-1

**PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 250

Versão: 03/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K031-1**

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	PROT
UNIDADES	g/dL
MODO DE ANÁLISE	PONTO FINAL
TIPO DE REAÇÃO	CRESCENTE
MODO DE LEITURA	MONOCROMÁTICA
FILTRO DE LEITURA	546
FILTRO REFERÊNCIA	-
VOLUME DE ASPIRAÇÃO	500
RÉPLICAS DO BRANCO	1
RÉPLICAS DA AMOSTRA	1
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	3
TEMPERATURA	37°C
DECIMAIS	1
CALIBRAÇÃO	CALIBRADOR
NÚMERO DE CALIBRADORES	1
CONCENTRAÇÃO	4.0
RÉPLICAS CALIBRAÇÃO	-
LIMITE DE LINEARIDADE	12.0
LIMITE DA ABS BRANCO	-
VALOR MÍNIMO NORMAL	6.0
VALOR MÁXIMO NORMAL	8.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.