

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 25

Versão: 17/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K108-1

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente N°3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	BIOPROT
TIPO	EP: PONTO FINAL
ZERO	BRANCO
UNIDADE	mg/dL
TEMPERATURA	37°C
CALIBRAÇÃO	SIM
NUM PADRÃO	1
CONCENTRAÇÃO	65.0
AMOSTRA	20 µL
REAGENTE 1	700 µL *
REAGENTE 2	-
FILTRO 1	630
NORMAL MÁX	15.0
NORMAL MÍN	1.0
LINEARIDADE MÁXIMA	100.0
MÁX ABS	2.500
MÍN ABS	0.001
TEMPO DE INCUBAÇÃO	3
NOME QC1	
VALOR QC1	#
DESVIO PADRÃO QC1	
NOME QC2	
VALOR QC2	#
DESVIO PADRÃO QC2	
NOME QC3	
VALOR QC3	#
DESVIO PADRÃO QC3	

Volume de Aspiração (*)

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente N° 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.