

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 83

Versão: 08/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K108-1

Reagente Nº 1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente Nº 3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

SIGLA ID	BIOP
NOME	BIOPROT
MARCA	BIOCLIN
UNIDADES	mg/dL
LONGITUDE DE ONDA	
Principal	590
Bicromática	0
VALORES DE REFERENCIA	
Homem	1,0 – 15,0
Mulher	1,0 – 15,0
TIPO	Ponto Final
INTERV. CALIBRAÇÃO	
VOLUMES (µL)	
Amostra	6
Reativo 1	300
Reativo 2	
TEMPOS	
Reativo 2	0
Incubação	300
Intervalo	0
LIMITES	
Inferior	1,8
Superior	100,0
Consumo	
REFERÊNCIA	Fator/Calibrador
FATOR	
DIREÇÃO DA REAÇÃO	Crescente
CALCULO	
Pendente	1
Interseção	0
ABS INICIAL	
Mínima	
Máxima	
CÁLCULO DO FATOR	Substituição
DECIMAIS	1
TEMPERATURA	37
VOLS. DESCARTE (µL)	
Reativo 1	0
Reativo 2	0
REATIVOS	Integridade
DILUIÇÃO	1:1

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente Nº 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.