

Catálogo: K010-1	CK NAC UV	Nº de Testes: 166	Versão: 27/03/2025
-------------------------	------------------	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

SIGLA ID	CK NAC
NOME	CK NAC
MARCA	BIOCLIN
UNIDADES	U/L
LONGITUDE DE ONDA	
Principal	340
Bicromática	0
VALORES DE REFERENCIA	
Homem	24 – 195
Mulher	24 – 170
TIPO	Cinética
INTERV. CALIBRAÇÃO	
VOLUMES (µL)	
Amostra	6
Reativo 1	240
Reativo 2	60
TEMPOS	
Reativo 2	120
Incubação	60
Intervalo	180
LIMITES	
Inferior	9,4
Superior	2000,0
Consumo	
REFERÊNCIA	Fator/Calibrador
FATOR	
DIREÇÃO DA REAÇÃO	Crescente
CALCULO	
Pendente	1
Interseção	0
ABS INICIAL	
Mínima	-3.000
Máxima	3.000
CÁLCULO DO FATOR	Substituição
DECIMAIS	1
TEMPERATURA	37
VOLS. DESCARTE (µL)	
Reativo 1	0
Reativo 2	0
REATIVOS	Integridade
DILUIÇÃO	1:1

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.