

Catálogo: K083-2

COLESTEROL MONOREAGENTE

Nº de Testes: 665

Versão: 28/05/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

SIGLA ID	COL
NOME	COLESTEROL
MARCA	BIOCLIN
UNIDADES	mg/dL
LONGITUDE DE ONDA	
Principal	505
Bicromática	0
VALORES DE REFERENCIA	
Homem	0 – 200
Mulher	0 – 200
TIPO	Ponto Final
INTERV. CALIBRAÇÃO	
VOLUMES (µL)	
Amostra	3
Reativo 1	300
Reativo 2	
TEMPOS	
Reativo 2	0
Incubação	300
Intervalo	0
LIMITES	
Inferior	1,5
Superior	500,0
Consumo	
REFERÊNCIA	Fator/Calibrador
FATOR	
DIREÇÃO DA REAÇÃO	Crescente
CALCULO	
Pendente	1
Interseção	0
ABS INICIAL	
Mínima	
Máxima	
CÁLCULO DO FATOR	Substituição
DECIMAIS	1
TEMPERATURA	37
VOLS. DESCARTE (µL)	
Reativo 1	0
Reativo 2	0
REATIVOS	Integridade
DILUIÇÃO	1:1

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.