

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 833

Versão: 28/05/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

SIGLA ID	PROT
NOME	PROTEÍNAS TOTAIS
MARCA	BIOCLIN
UNIDADES	g/dL
LONGITUDE DE ONDA	
Principal	546
Bicromática	0
VALORES DE REFERENCIA	
Homem	6,0 – 8,0
Mulher	6,0 – 8,0
TIPO	Ponto Final
INTERV. CALIBRAÇÃO	
VOLUMES (µL)	
Amostra	6
Reativo 1	300
Reativo 2	
TEMPOS	
Reativo 2	0
Incubação	300
Intervalo	0
LIMITES	
Inferior	0,0
Superior	12,0
Consumo	
REFERÊNCIA	Fator/Calibrador
FATOR	
DIREÇÃO DA REAÇÃO	Crescente
CALCULO	
Pendente	1
Interseção	0
ABS INICIAL	
Mínima	
Máxima	
CÁLCULO DO FATOR	Substituição
DECIMAIS	1
TEMPERATURA	37
VOLS. DESCARTE (µL)	
Reativo 1	0
Reativo 2	0
REATIVOS	Integridade
DILUIÇÃO	1:1

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.