

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 125

Versão: 22/06/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO:

K108-1

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente Nº3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

GENERAL

MEASUREMENT MODE: ABSORB
 REACTION MODE: R-S
 CALIBRATION MODE: SLOPE AVG
 REAGENT BLANK: REAG/DIL
 CLEANER: NO
 WAVELENGTH: 600 nm
 DECIMAL POSITION: 1
 UNIT: mg/dL

ANALYSIS

POST. DIL. FACTOR: 5.0
 CONC. FACTOR NO

 SAMPLE CYCLE: 2
 VOLUME: 4.0 µL
 DILUENT NAME: H2O
 VOLUME: 30.0 µL
 REAGENT CYCLE: 1
 VOLUME: 200 µL

CALCULATION

SAMPLE LIMIT NO
 REAC. DIRECTION INCREASE
 CHECK ON
 CONVERS. FACTOR 1.00000
 OFFSET 0.00000
 TEST RANGE LOW 1.8
 HIGH 100.0
 NORM. RANGE LOW 1.0
 HIGH 15.0
 NUMBER OF STEPS 1
 CALC. STEP A ENDPOINT
 READING FIRST: 1 LAST: 12

CALIBRATION

CALIB. INTERVAL ON REQUEST
 BLANK
 REAG. RANGE LOW NO
 HIGH NO
 BLANK RANGE LOW NO
 HIGH NO
 CALIBRATOR
 POS.: #
 CAL 1.: PADRÃO
 REPLICATE DUPL
 DEVIATION 10%

CONTROL

CS1 POS: *
 CS2 POS: *
 CS3 POS: *

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente Nº 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.