

Catálogo: K084-2

LACTATO

Nº de Testes: 200

Versão: 10/07/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO:

K084-2

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 2 x 20 mL

Reagente N°2 – Coenzima – 2 x 5 mL

Reagente N°3 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

GENERAL

MEASUREMENT MODE: ABSORB
 REACTION MODE: R-S-SR1
 CALIBRATION MODE: SLOPE AVG
 REAGENT BLANK: REAG/DIL
 CLEANER: NO
 WAVELENGTH: 340 nm
 DECIMAL POSITION: 1
 UNIT: mg/dL

ANALYSIS

POST. DIL. FACTOR: 2.00
 CONC. FACTOR: NO

 SAMPLE CYCLE: 1
 VOLUME: 2.0 µL
 DILUENT NAME: H2O
 VOLUME: 20.0 µL
 REAGENT CYCLE: 1
 VOLUME: 160 µL
 START R1 CYCLE: 8
 VOLUME: 40.0 µL
 DILUENT NAME: H2O
 VOLUME: 10.0 µL

CALCULATION

SAMPLE LIMIT NO
 REAC. DIRECTION INCREASE
 CHECK ON
 CONVERS. FACTOR 1.00000
 OFFSET 0.00000
 TEST RANGE LOW 1.0
 HIGH 120.0
 NORM. RANGE LOW 4.5
 HIGH 19.8
 NUMBER OF STEPS 1
 CALC. STEP A ENDPOINT
 READING FIRST: 7 LAST: 16

CALIBRATION

CALIB. INTERVAL ON REQUEST
 BLANK
 REAG. RANGE LOW NO
 HIGH NO
 BLANK RANGE LOW NO
 HIGH NO
 CALIBRATOR
 POS.: #
 CAL 1.: BIOCAL
 REPLICATE DUPL
 DEVIATION 10%

CONTROL

CS1 POS: *
 CS2 POS: *
 CS3 POS: *

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.