

Catálogo: K049-6

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de Testes: 333

Versão: 02/08/2017

Cód. 00

Os reagentes são prontos para uso.

Type	Kinetic
Zero	Water
Unit	U/L
Temperature	37° C
Filling	-
Decimal	-
Needle Washing	2
Cuvette Washing	Double
Washing Mode	Fast
Wavelength	340

Calibration	Standard
Calibrator	BIOCAL
Value	#
Repeat N°	1

Sample Volum	30 µL
Reagent 1 Volum	240 µL
Reagent 2 Volum	60 µL
Reagent 3 Volum	-
Reagent 2 Delay	120
Reagent 3 Delay	-
Dilution	-
Sample	-
Diluent	-

Incubation Time	60
Reading Time	180
Check Blank Drift	No

Max. Conc.	400
Min. Conc.	1
Max. ABS	-
Min. ABS	-
Max. Delta ABS	-
Min. Delta ABS	-
Max ABS Substr./Depl.	-
Min ABS Substr./Depl.	-
Fluctuation Rate (%)	-

Quality	-
Control 1	Biocontrol N
Control 2	Biocontrol P

Normality	Min	Max
Man	5	38
Woman	5	38

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.