

<b>Catálogo: K049</b>	<b>TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA</b>	<b>Nº de Testes: 400</b>	<b>Versão: 04/02/2019</b>
-----------------------	--	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K049-6**

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

**PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:**

Misturar 4 partes do Reagente Nº 1 (Substrato) com 1 parte do Reagente Nº 2 (Coenzima). O Reagente de Trabalho é estável 72 horas entre 15 e 30°C e 14 dias entre 2 e 8°C.

<b>P1   GERAL</b>		<b>P2   GERAL</b>	
Nome	ALT_TGP	Nome	ALT_TGP
Abreviatura do Nome	ALT_TGP	Pré Diluição	Não
Código	#	<b>AMOSTRA</b>	
Modo	Cinético	Branco de Amostra	Não
Comprimento de Onda	340 nm	Volume Normal	25.0 µL
Unidades	U/L	Volume do Novo Ensaio	25.0 µL
Decimais	0	<b>REAGENTES</b>	
Repetições do Teste	1	Branco do Reagente	Não
Limites de Concentração	1.4   400.0	Repetições	0
Nome do Calibrador	Biocal		
Verificação de Prozona	Não		
<b>TIPOS DE AMOSTRAS</b>	<b>NORMAL</b>		
Permitido	Sim	Ad. Reagente em -2.25 min. (R1)	Normal 250 µL   Nv. Ensaio 250 µL
Pré Diluição	Não	Ad. Reagente em 2.90 min. (R2)	0 µL   0 µL
		Ad. Reagente em 4.70 min. (R3)	0 µL   0 µL
<b>VALORES DE REFERÊNCIA</b>		<b>MEDIÇÃO</b>	
Masculino	5   38	Inclinação Branco	Não
Feminino	5   38	Atraso Min. Tempo (seg.)	60   180
Pediátrico	0   0	Limite de Alinearidade	10%
Pânico	0   0	Factor	INF
<b>CONTROLES</b>		<b>LIMITES DE ABSORVÂNCIA</b>	
Controle 1	Biocontrol N	Absorvância	-0.100   3.000
Controle 2	Biocontrol P	R. Absorvância	-0.100   3.000
Controle 3	-	Esg. de Substrato	0.100   Abs
<b>CORRELAÇÃO</b>		<b>LIMITES DE ABSORVÂNCIA DO BRANCO DE AMOSTRA</b>	
Fator de Correlação	1.00	Absorvância	-0.100   3.000
Desvio de Correlação	0.00	R. Absorvância	-0.100   3.000
		Esg. De Substrato	0.100   Abs

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.