

Catálogo: K139-1

ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE

Nº de Testes: 312

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM			
TEST:	ÁCIDO ÚRICO	UNIT: mg/dL	
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)	[700] [505]	
ASSAY CODE:	[1POINT] [10] []	ASSAY POINT:[31]-[]-[]-[]	
	[SERUM]		
SAMPLE VOL:	NORMAL	8	
	DECREASE	4	
	INCREASE	16	
R1 VOLUME:	320		
R2 VOLUME:	0		
R3 VOLUME:	0		
R4 VOLUME:	0		
ABS LIMIT:	00000 – INCREASE		
PROZONE LIMIT:	0 - LOWER		
CALIB TYPE:	[LINEAR] POINT: [2] [2] [0]		
SD LIMIT:	0.1		
DUPLICATE LIMIT:	150	S1 ABS LIMIT: [-32000] [32000]	
SENSITIVITY LIMIT:	000		
EXPECTED VALUE:	1.5 - 7.0		
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 - 20		

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.