

Catálogo: K046

AMILASE CINÉTICA

Nº de Testes: 200

Versão: 28/03/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K046-1

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O reagente é pronto para uso.

PROGRAM			
TEST:	AMILASE	UNIT: U/L	
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)	[700]	[415]
ASSAY CODE:	[RATE A]	[5] []	ASSAY POINT:[5] - [12] - [] - []
		[SERUM]	
	SAMPLE VOL:	NORMAL	6
		DECREASE	6
		INCREASE	6
	R1 VOLUME:	300	
	R2 VOLUME:	0	
	R3 VOLUME:	0	
	R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:		00000 – INCREASE	
PROZONE LIMIT:		0 - LOWER	
CALIB TYPE:		[LINEAR]	POINT: [2] [2] [0]
SD LIMIT:		0.1	
DUPLICATE LIMIT:	200	S1 ABS LIMIT:	[-32000)] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:		0	
EXPECTED VALUE:		0 – 90	
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:		0 – 2000	

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.