

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 83

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM			
TEST:	BIOPROT		UNIT: mg/dL
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)		[700] [600]
ASSAY CODE:	[1POINT] [10] []		ASSAY POINT:[31]-[]-[]-[]
		[URINE]	
	SAMPLE VOL: NORMAL		6
		DECREASE	3
		INCREASE	12
	R1 VOLUME:	300	
	R2 VOLUME:	0	
	R3 VOLUME:	0	
	R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:		00000	-INCREASE
PROZONE LIMIT:		0	-LOWER
CALIB TYPE:		[LINEAR]	POINT: [2] [2] [0]
SD LIMIT:		0.1	
DUPLICATE LIMIT:	150		S1 ABS LIMIT: [-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	000		
EXPECTED VALUE:		1.0	- 15.0
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:		0.0	- 100.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente Nº 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.