

Catálogo: K069

CK MB UV

Nº de Testes: 166

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso: Técnica Birreagente.

PROGRAM			
TEST:	CK MB		UNIT: U/L
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)		[700] [340]
ASSAY CODE:	[RATE A] [10] []		ASSAY POINT:[25] - [35] - [] - []
		[SERUM]	
	SAMPLE VOL: NORMAL		12
		DECREASE	6
		INCREASE	24
	R1 VOLUME:	240	
	R2 VOLUME:	60	
	R3 VOLUME:	0	
	R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:		00000	– INCREASE
PROZONE LIMIT:		0	- LOWER
CALIB TYPE:		[LINEAR]	POINT: [2] [2] [0]
SD LIMIT:		0.1	
DUPLICATE LIMIT:	10%		S1 ABS LIMIT: [-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:		000	
EXPECTED VALUE:		0 – 25	
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:		0 – 600	

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.