

Catálogo: K083-2

COLESTEROL MONOREAGENTE

Nº de Testes: 666

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM			
TEST:	COLESTEROL		UNIT: mg/dL
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)		[700] [505]
ASSAY CODE:	[1POINT] [10] []	ASSAY POINT:	[31] - [] - [] - []
	[SERUM]		
	SAMPLE VOL: NORMAL		3
	DECREASE		3
	INCREASE		6
	R1 VOLUME: 300		
	R2 VOLUME: 0		
	R3 VOLUME: 0		
	R4 VOLUME: 0		
ABS LIMIT:	00000	-INCREASE	
PROZONE LIMIT:	0	-LOWER	
CALIB TYPE:	[LINEAR] POINT:	[2] [2] [0]	
SD LIMIT:	0.1		
DUPLICATE LIMIT:	10%	S1 ABS LIMIT:	[-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	000		
EXPECTED VALUE:	0 - 200		
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 - 500		

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.