

Catálogo: K068-1

FÓSFORO UV

Nº de Testes: 333

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM			
TEST:	FÓSFORO UV	UNIT:	mg/dL
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)	[700]	[340]
ASSAY CODE:	[1POINT] [10] []	ASSAY POINT:	[31] - [] - [] - []
	[SERUM]		
SAMPLE VOL:	NORMAL		3
	DECREASE		3
	INCREASE		6
R1 VOLUME:	300		
R2 VOLUME:	0		
R3 VOLUME:	0		
R4 VOLUME:	0		
ABS LIMIT:	00000	– INCREASE	
PROZONE LIMIT:	0	- LOWER	
CALIB TYPE:	[LINEAR]	POINT:	[2] [2] [0]
SD LIMIT:	0.1		
DUPLICATE LIMIT:	10%	S1 ABS LIMIT:	[-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	000		
EXPECTED VALUE:	2.5 – 4.8		
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0.0 – 15.0		

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.