

Catálogo: K082-2

**GLICOSE MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 1666

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

<b>PROGRAM</b>			
TEST:	GLICOSE		UNIT: mg/dL
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)		[700] [505]
ASSAY CODE:	[1POINT] [ 10 ] [ ]		ASSAY POINT:[ 31 ]-[ ]-[ ]-[ ]
		[SERUM]	
	SAMPLE VOL: NORMAL		3
		DECREASE	3
		INCREASE	6
	R1 VOLUME:	300	
	R2 VOLUME:	0	
	R3 VOLUME:	0	
	R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:		00000	-INCREASE
PROZONE LIMIT:		0	-LOWER
CALIB TYPE:		[LINEAR] POINT:	[ 2 ] [ 2 ] [ 0 ]
SD LIMIT:		0.1	
DUPLICATE LIMIT:	10%	S1 ABS LIMIT:	[-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:		000	
EXPECTED VALUE:		65	- 99
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:		0	- 500

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.