

Catálogo: K116.2

**MAGNÉSIO MONORREAGENTE**

Nº de Testes: 665

Versão: 28/03/2019

Cód.: 00

**K116-2**

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 2 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

<b>PROGRAM</b>			
TEST:	MAGNESIO		UNIT: mg/dL
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)		[0] [505]
ASSAY CODE:	[1POINT] [5] [ ]	ASSAY POINT:	[15]-[ ]-[ ]-[ ]
	[SERUM]		
	SAMPLE VOL: NORMAL		3
	DECREASE		3
	INCREASE		6
	R1 VOLUME: 300		
	R2 VOLUME: 0		
	R3 VOLUME: 0		
	R4 VOLUME: 0		
ABS LIMIT:	00000 – INCREASE		
PROZONE LIMIT:	0 -LOWER		
CALIB TYPE:	[LINEAR] POINT: [2][2][0]		
SD LIMIT:	0.1		
DUPLICATE LIMIT:	200	S1 ABS LIMIT:	[-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	0		
EXPECTED VALUE:	1.6 – 2.4		
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 - 5		

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 2,0 mg/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Bioal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.