

Catálogo: K031

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 833

Versão: 28/03/2019

Cód.: 00

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM		
TEST:	PROTEINAS TOTAIS	UNIT: g/dL
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)	[700] [546]
ASSAY CODE:	[1POINT] [10] []	ASSAY POINT:[31] [] [] []
	[SERUM]	
	SAMPLE VOL: NORMAL	3
	DECREASE	3
	INCREASE	6
	R1 VOLUME: 300	
	R2 VOLUME: 0	
	R3 VOLUME: 0	
	R4 VOLUME: 0	
ABS LIMIT:	00000 – INCREASE	
PROZONE LIMIT:	0 - LOWER	
CALIB TYPE:	[LINEAR] POINT: [2] [2] [0]	
SD LIMIT:	0.1	
DUPLICATE LIMIT:	200	S1 ABS LIMIT: [-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	000	
EXPECTED VALUE:	6.0 – 8.0	
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 - 12.0	

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.