

Catálogo: K049

TRASAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de Testes: 333

Versão: 13/02/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K049-6

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM			
TEST:	ALT-TGP	UNIT: U/L	
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)	[700]	[340]
ASSAY CODE:	[RATE A]	[10] []	ASSAY POINT: [15] - [25] - [] - []
		[SERUM]	
	SAMPLE VOL:	NORMAL	30
		DECREASE	30
		INCREASE	30
	R1 VOLUME:	240	
	R2 VOLUME:	60	
	R3 VOLUME:	0	
	R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:	00000 – DECREASE		
PROZONE LIMIT:	0 -LOWER		
CALIB TYPE:	[LINEAR]	POINT: [2] [2] [0]	
SD LIMIT:	0.1		
DUPLICATE LIMIT:	200	S1 ABS LIMIT: [-32000]	[32000]
SENSITIVITY LIMIT:	000		
EXPECTED VALUE:	5 – 38		
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 – 400		

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.