

Catálogo: K048

TRASAMINASE AST (TGO) CINÉTICA

Nº de Testes: 333

Versão: 13/02/2019

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K048-6**

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

Os reagentes são prontos para uso.

<b>PROGRAM</b>			
TEST:	AST-TGO	UNIT:	U/L
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)	[700]	[340]
ASSAY CODE:	[RATE A]	[ 10 ] [ ]	ASSAY POINT: [15 ] - [25] - [ ] - [ ]
		[SERUM]	
	SAMPLE VOL:	NORMAL	30
		DECREASE	30
		INCREASE	30
	R1 VOLUME:	240	
	R2 VOLUME:	60	
	R3 VOLUME:	0	
	R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:		00000	– DECREASE
PROZONE LIMIT:		0	-LOWER
CALIB TYPE:		[LINEAR]	POINT: [ 2 ] [ 2 ] [ 0 ]
SD LIMIT:		0.1	
DUPLICATE LIMIT:		200	S1 ABS LIMIT: [-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:		000	
EXPECTED VALUE:	(M)	11 – 39	(F) 10 – 37
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:		0 – 400	

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.