

Catálogo: K117-1

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Nº de Testes: 333

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM		
TEST:	TRIGLICÉRIDES	UNIT: mg/dL
WAVELENGTH.:	(2 END / PRIMARY)	[700] [505]
ASSAY CODE:	[1POINT] [10] []	ASSAY POINT:[31]-[]-[]-[]
	[SERUM]	
SAMPLE VOL:	NORMAL	3
	DECREASE	3
	INCREASE	6
R1 VOLUME:	300	
R2 VOLUME:	0	
R3 VOLUME:	0	
R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:	00000 – INCREASE	
PROZONE LIMIT:	0 -LOWER	
CALIB TYPE:	[LINEAR] POINT: [2] [2] [0]	
SD LIMIT:	0.1	
DUPLICATE LIMIT:	10%	S1 ABS LIMIT: [-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	000	
EXPECTED VALUE:	0 – 150	
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 – 900	

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.