

Catálogo: K051-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 100

Versão: 13/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K051-2

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

ITEM NAME	CÁLCIO ARS III
METHOD	END POINT
UNIT	mg/dL
TEMPERATURE	37°C
WAVELENGTH	620
SUB WAVELENGTH	-
BLANK	REAGENT
FACTOR	-
NORMS HIGH	11.0
NORMS LOW	8.8
DELAY TIME	03
TEST TIME	-
DECIMAL DIGITS	2
ASPIRATE VOLUME (µL)	500

STANDARD TEST PARAMETERS	
METHOD	LINEAR
NUM. OF STD.	1
NUM REPEAT	3
CONCENTRATION	10.0

CONTROL TEST PARAMETERS	
CONTROL NUMBER	#
AVERAGE VALUE	#
SD	#
BATCH NUMBER	0000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.