

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 1250

Versão: 06/11/2018

Cód. 00

Os reagentes são prontos para uso.

ID Método	PROT
Nome	Proteínas Totais Bioclin
Tipo de Reação	Ponto Final
Tipo de Amostra	Soro
Unidades	g/dL
Decimais	2

Comprimento de Onda	
Principal	545
Secundário	-
Leituras	
Tempo (seg)	300
Precisão Extra	✓

Dispensação	Volume	Tempo
Amostra	4	0
1º Reagente	200	0
2º Reagente	-	-

Diluyente de Amostra	Soluções (...)
Pré-Diluição	-

Tipo de Calibração	Linear
Conversão de Unidades	
Fator	1
Bias	0
Direção	Crescente
Verificação da Direção	✓

Branco de Reagente	
Habilitado	✓
Substituição de Amostra com	-
Tempo de Validade	-

Limite de Validade de Concentração	
Baixo	0
Alto	12
Limites de Absorbância de Verif. Integr.	-
Limites de Duplicação da Concentração	-

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.