

Catálogo: K049-6

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de Testes: 500

Versão: 06/11/2018

Cód. 00

Os reagentes são prontos para uso.

ID Método	TGP
Nome	ALT_TGP Bioclin
Tipo de Reação	Cinética
Tipo de Amostra	Soro
Unidades	U/L
Decimais	2

Comprimento de Onda	
Principal	340
Secundário	-
Leituras	
Incubação (seg)	60
Tempo de Reação (seg)	180

Dispensação	Volume	Tempo
Amostra	20	0
1º Reagente	160	0
2º Reagente	40	0

Diluyente de Amostra	Soluções (...)
Pré-Diluição	-

Tipo de Calibração	Linear
Conversão de Unidades	
Fator	1
Bias	0
Direção	Crescente
Verificação da Direção	✓

Branco de Reagente	
Habilitado	-
Substituição de Amostra com	-
Tempo de Validade	-

Limite de Validade de Concentração	
Baixo	2
Alto	400
Limites de Absorbância de Verif. Integr.	-
Limites de Duplicação da Concentração	-

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.