

Catálogo: K040-1

ALBUMINA MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 25/04/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso

Modo	End Point		
Test	Albumina		
Full Name	Albumina Bioclin		
Temperature	37°C		
Wavelength 1	630 mn		
Wavelength 2	999		
Blank	R. Blank		
Factor	1000		
Sample Vol	10		
Reagent Vol	1000		
Aspirate Vol	500		
Delay Time(s)	5		
Read Time (s)	1		
Unit	g/dL		
Decimal	1		
Linearity Error	-		
Linearity Limit	6,0		
Reference	3,5	5,5	
Nº of Standards	1		
Repeat Time(s)	1		
Calculation Method	Linear		
Standard Concentration	6,0		
	Control 1	Control 2	Control 3
Target			
SD	#	#	#
Lote			

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.