

Catálogo: K046-1

AMILASE CINÉTICA

Nº de Testes: 60

Versão: 25/04/2018

Cód.: 00

O reagente é pronto para uso.

Modo	Kinetic		
Test	Amilase		
Full Name	Amilase Bioclin		
Temperature	37°C		
Wavelength 1	405 mn		
Wavelength 2	999		
Blank	None		
Factor	3954		
Sample Vol	20		
Reagent Vol	1000		
Aspirate Vol	500		
Delay Time(s)	60		
Read Time (s)	180		
Unit	U/L		
Decimal	1		
Linearity Error	-		
Linearity Limit	2000		
Reference	0,0	90,0	
Calculation Method	Linear		
	Control 1	Control 2	Control 3
Target			
SD	#	#	#
Lote			

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.