

Catálogo: K084-2

LACTATO

Nº de Testes: 50

Versão: 25/04/2018

Cód.: 00

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO PARA DOSAGEM MONORREAGENTE:

Misturar 4 partes do reagente Nº 1 com uma 1 parte do reagente Nº 2. O Reagente de Trabalho é estável durante 2 semanas entre 2 e 8°C.

Modo	End Point		
Test	Lactato		
Full Name	Lactato Bioclin		
Temperature	37°C		
Wavelength 1	340 mn		
Wavelength 2	999		
Blank	R. Blank		
Factor	1000		
Sample Vol	10		
Reagent Vol	1000		
Aspirate Vol	500		
Delay Time(s)	5		
Read Time (s)	1		
Unit	mg/dL		
Decimal	1		
Linearity Error	-		
Linearity Limit	120		
Reference	4,5	19,8	
Nº of Standards	1		
Repeat Time(s)	1		
Calculation Method	Linear		
Standard Concentration	30,0		
	Control 1	Control 2	Control 3
Target			
SD	#	#	#
Lote			

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 3 (Padrão 30,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.