

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 25/04/2018

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso

Modo	End Point		
Test	Proteínas Totais		
Full Name	Proteínas Totais Bioclin		
Temperature	37°C		
Wavelength 1	546 mn		
Wavelength 2	999		
Blank	R. Blank		
Factor	1000		
Sample Vol	20		
Reagent Vol	1000		
Aspirate Vol	500		
Delay Time(s)	5		
Read Time (s)	1		
Unit	g/dL		
Decimal	1		
Linearity Error	-		
Linearity Limit	12,0		
Reference	6,0	8,0	
Nº of Standards	1		
Repeat Time(s)	1		
Calculation Method	Linear		
Standard Concentration	4,0		
	Control 1	Control 2	Control 3
Target			
SD	#	#	#
Lote			

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.