

Catálogo: K031

PROTEÍNAS TOTAIS MONORREAGENTE

Nº de Testes: 1250

Versão: 25/01/2019

Cód.: 00

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os Reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters1

Method No.	#	Method Name	PRO	R1	PROTEÍNAS	Reagent (µl)	200	Water (µl)	0
Print Name	PROTEÍNAS TOTAIS			R2					
Sample Type	Serum			Diluent	H <sub>2</sub> O				
Unit	g/dL			Sample Ppt Wash	Disable				
Assay Type	End								

  

Measuring Points	Start	End	Stirring Speed
1	45	46	R1 Middle
2	Disable	0	R2 Middle

  

N°	Normal Range Name	Min	Máx
1	Male-G1	0.00	0.00
2	Male-G2	0.00	0.00
3	Male-G3	0.00	0.00
4	Female-G1	0.00	0.00

  

Wave Length	Pri	546	Sec	-
-------------	-----	-----	-----	---

  

Normal	Sample Volume (µl)	Technical Range
	Low Normal High	Conc.
Dilution	0.0 < 4 < 0.0	0.05 - 12.00
Rerun (High/Prozone)		(mAbs./10) -999999 - 999999
Dilution	0.0 < 4 < 0.0	Prev. Result Comparison (%)
Rerun (Low)		9999999.00 0.00 %
Dilution	0.0 < 4 < 0.0	Abnormal Range
		(Conc.) 0.00 - 9999999.00
		Panic Range
		(Conc.) 0.00 - 9999999.00

  

Decimal Point	2	Profile SI	Disable
---------------	---	------------	---------

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 mg/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.