

Catálogo: K084-2

LACTATO

Nº de Testes: 250

Versão: 06/12/2017

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso em analisadores bioquímicos automáticos.

Chemistry Parameters				Reagent Name	Reagent (µl)	Water (µl)	
Method No.	#	Name	LAC	R1	Enzimático	160	0
Print Name	Lactato Bioclin			R2	Coenzima	40	0
Sample Type	Serum			Diluent			
Unit	mg/dL			Decimal Points	2		
Assay Type	End						
Measuring Points	Start	End					
	1	26	-	27			
	2	49	-	50			
Wavelength	Pri	340	Sec.	<input type="checkbox"/>	Dis.	-	
Normal	Normal Range						
	Nº	Range Name	Min	Máx			
	1	Male-G1	0.00	0.00			
	2	Male-G2	0.00	0.00			
	3	Male-G3	0.00	0.00			
	4	Female-G1	0.00	0.00			
Dilution	Technical Range						
	Conc.	1.0	-	120.0			
Rerun (High/Prozone)	Dilution			(mAbs./10)	-999999	-	999999
Dilution	2.0	<	0.0	<	0.0		
Rerun (Low)	Dilution						
Dilution	2.0	<	0.0	<	0.0		
Reaction	SPT Wash			Enable	Reagent Name		
	Increase						
	Stirring Speed			R1	Middle	R2	Middle

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.