

Catálogo: K048-6

TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA

Nº de Testes: 500

Versão: 06/12/2017

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters

Method No. #	Name TGO	R1	Substrato	160	0
Print Name	AST_TGO Bioclin	R2	Coenzima	40	0
Sample Type	Serum	Diluent			
Unit	U/L	Decimal Points	2		
Assay Type	Rate				

Measuring Points	Start	End
1	40	55
2		

Wavelength	Pri 340	Sec. <input type="checkbox"/> Dis. -
------------	---------	--------------------------------------

Normal	Sampling	Sample	Diluent
Dilution	20.0	< 0.0	< 0.0
Rerun (High/Prozone)			
Dilution	20.0	< 0.0	< 0.0
Rerun (Low)			
Dilution	20.0	< 0.0	< 0.0

Reaction	Decrease
----------	----------

Normal Range				
Nº	Range Name	Min	Máx	
1	Male-G1	0.00	0.00	
2	Male-G2	0.00	0.00	
3	Male-G3	0.00	0.00	
4	Female-G1	0.00	0.00	
Technical Range				
Conc.	3.0	-	400.0	
(mAbs./10)	-999999	-	999999	
SPT Wash	Enable	Reagent Name		
Stirring Speed	R1	Middle	R2	Middle

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.